

＊ ＊ 2026年 1 月改訂（第 7 版）

＊ 2024 年 8 月改訂（第 6 版）

医療用品 04 整形用品

高度管理医療機器 ヒアルロン酸使用軟組織注入材（70441000）

レスチレン® リド

再使用禁止

医療機器承認番号 22700BZX00177000

【警告】

（使用方法）

1. 本品を血管内に注入しないこと。注入部位の顔面解剖学を十分に理解した上で使用すること。[過って血管内に注入した場合や、血管や弱い組織を穿刺・圧迫した場合、壊死、潰瘍又は瘻痕を生じるおそれがある。まれに遠位部の塞栓により視力障害／失明及び脳梗塞を起こすおそれがある。]
2. 眼窩周囲、眼窩縁下方、鼻頬溝、眉間及び額等、軟部組織の支持が限られ、皮膚が薄い部位を処置する場合は、触知可能な腫瘍を生じないように、特に注意すること。また、側副血行が限られている部位（例えば、眉間及び額等）の処置は、虚血のリスクが増加するため、特に注意すること。
3. 炎症症状（嚢胞、ざ瘡、発疹、蕁麻疹等の皮疹）、感染及び腫瘍がある部位へは本品を使用しないこと。

【禁忌・禁止】

（使用方法）

1. 再使用禁止
- （適用対象（患者））
2. 次の患者には使用しないこと。
 - （1）本品の成分又はグラム陽性菌由来タンパクに対するアレルギーの既往歴のある患者 [本品には微量のグラム陽性菌由来タンパクが含まれている可能性がある。]
 - （2）リドカイン等のアミド型局所麻酔剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【形状・構造及び原理等】


本品はヒアルロン酸ゲル（均質の無色透明ゲル）をシリンジに充填したものである。

【構成】

本体：シリンジ充填済みヒアルロン酸ゲル

附属品：滅菌済み 29G TW×1/2 インチニードル（単回使用）

＜シリンジ＞

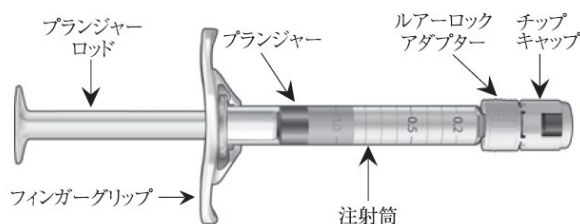

【ゲルの組成】（人体に直接接触）

主剤：安定化ヒアルロン酸ナトリウム 20mg/mL

リドカイン塩酸塩水和物 3mg/mL

希釈液：リン酸緩衝生理食塩液

リドカイン塩酸塩は、神経膜のナトリウムチャンネルに作用し、神経における活動電位の伝導を可逆的に抑制し、知覚神経及び運動神経の伝達経路を遮断する局所麻酔薬である。


本品類似品（レスチレン リフト リド）を 150mmol/L 塩化ナトリウム含有 pH7.5 の 8mmol/L リン酸塩緩衝液 300mL 中に浸漬し、37℃、90rpm で攪拌し、試験溶液から 1mL を採取し、HPLC 法（UV 検出）でリドカイン濃度を測定したところ、リドカインは約 4 時間以内に放出された。

一般名：リドカイン塩酸塩水和物

（Lidocaine Hydrochloride Monohydrate）（JAN）

化学名：2-（Diethylamino）-N-（2,6-dimethylphenyl）acetamide monohydrochloride monohydrate

構造式：

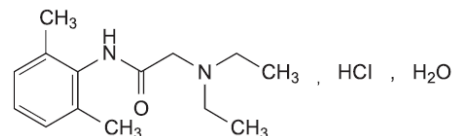

【動作・作動原理】

本品は組織に膨隆作用を供与する皮膚注入材であり、皮膚の外観を希望のレベルまで整容する。膨隆作用は、ヒアルロン酸が多量の水と結合することにより生じる。また、リドカインの添加により注入時の疼痛を軽減する。

【使用目的又は効果】


本品は、真皮中間層から深層に注入し、中等度から重度の顔面の皺（ほうれい線等）の矯正及び整容を目的とする。なお、口唇、眼瞼への使用及び隆鼻術等の形状の変更を目的とした使用は本品の適応に含まれない。

【使用方法等】


＊ 〈事前準備〉

1. 滅菌済み手袋を着用する。

- 親指と人差し指でシリンジの注射筒とルアーロックアダプター③の両方をしっかりとつかむ。
- もう片方の手でシリンジの先端にあるチップキャップ④をつまんで折り曲げる。チップキャップ④の接続部が③から外れた後（封緘シールが破れた後）、チップキャップ④を引き抜いて外す（チップキャップ④を回さないこと）。
- 滅菌を保つため、シリンジ側先端のチップ⑤に触れないこと。

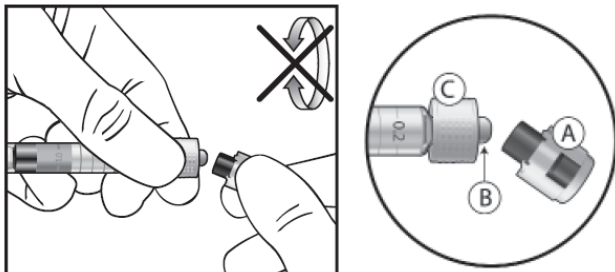

5. ニードルキャップを持ち、ニードルを開封する。
6. シリンジの注射筒とルアーロックアダプター③の両方をしっかりとつかむ。
7. ニードルをルアーロックアダプター③に時計回りに回しながら押し込み、確実に装着させる。
8. シリンジとルアーロックアダプターをつかんだまま、反対の手でニードルキャップをまっすぐ引き抜く。回転させないこと。厳重な無菌的操作のもとに行うこと。

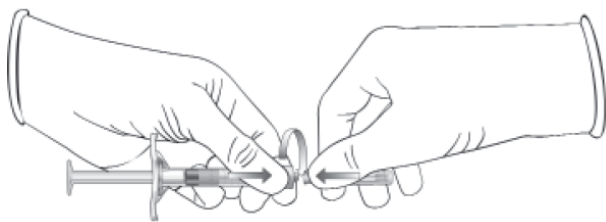

〈注入方法〉

1. 患者の顔面を石鹸及び水で洗浄し、清潔なタオルで拭き取り乾燥させる。アルコール又は他の適切な消毒液で処置を行う領域を清拭する。
2. ニードルの先端に小滴が見えるまでプランジャーロッドを慎重に押し進める。
3. ニードルを皺（ほうれい線等）に対して約30°の角度で挿入する。
4. 注入前に吸引操作により血液の逆流が無いことを確認する（不注意による血管内注入や血管閉塞を避けるため）。
5. プランジャーロッドに一定の圧を加え、真皮中間層から深層に希望の膨隆作用が得られる量を注入する。
6. ニードルを皮膚から引き抜く直前に注入を止め、ニードルを抜去する。
7. 使用済みシリンジ及びニードル並びに開封後の材料は処置後直ちに廃棄し、再使用してはならない。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

併用機器

本品に同梱されている滅菌済みニードル（メス型ルアーロックアダプター付き 29G TW×1/2 インチニードル）の使用を推奨する。なお、29G TW、30G のニードル以外の併用機器を使用した場合の有効性、安全性は臨床試験等では確認されていない。〔ニードルのサイズと長さは、注入材の押出し力に影響を

及ぼす。不適切なニードルの使用は、注入時の抵抗を増大し、注入材の漏れやシリンジからのニードル外れにつながるリスクが高まる。〕

＊ 事前準備

1. ニードルをシリンジにしっかりと取り付けることが重要である。正しく取り付けしていない場合、注入の際にニードルがシリンジから外れるおそれがある。
2. 破損を避けるため、ニードルを湾曲させないこと。ニードルが湾曲した場合には廃棄し、新しいニードルに交換すること。
3. シリンジの内容物が分離の徴候を示す場合又は混濁している場合には、当該製品を使用しないこと。裂傷等のけがを避けるため、ガラス製シリンジの取り扱い及び破損したガラスの廃棄には、十分に注意すること。

＊ 注入方法

1. 注入方法の詳細については、別途提供される製品ガイドを参照のこと。
2. 本品を他の製品と混合して使用しないこと。
3. 注入量は、注入部位及び皺の重症度に応じて決定する。各投与の標準的な使用方法は、注入部位と皺の重症度により異なる。本品又は本品とレスチレン リフト リドとを同時使用する場合、注入量は、1 回の処置につき（初回及びタッチアップ処置、顔の両側を含める）患者あたり 6.0mL に制限すること。本品、レスチレン、レスチレン リフト及びレスチレン リフト リドの臨床試験における総注入量は、初回処置時で平均 3.0mL、再処置時で平均 1.7mL であった。
4. 処置の最終的な結果を得るためには、正しい注入手技が必須である。針の横方向の動きによる表皮下の解離、高い流量（>0.3mL/分）、速い注入速度、又は高い注入量は、注入部位の一時的な内出血、腫脹、発赤、疼痛、又は圧痛を増加させる可能性がある。また、扇状注入法は、内出血等の局所炎症反応を増加させることがある。シリンジに過度に力をかけないようにすること。瘢痕組織では、ニードルが前に進まない場合がある。抵抗を感じた場合には、ニードルを少し引き戻して位置を変えるか、ニードルを完全に抜去して動作確認すること。
5. 処置部位ごとにニードルを交換することを推奨する。
6. 過度な注入を行わないこと。周辺組織の外観となじむよう、注入後に注入部位をマッサージすること。注入により皮膚に変形が生じた場合、その部分の変形が消えるまで手でなじませることにより、期待する外観が得られる。
7. 整容の程度及び持続期間は、処置する皺の性質や、注入部位の組織応力、組織への注入深度及び注入技術によって異なる。
8. 注入深度が浅すぎると、腫瘍や青変を生じるおそれがある。
9. 表面の皮膚が白変した場合は特に注意し、直ちに注入を止め、正常な皮膚色に戻るまでその部位をマッサージすること。

10. 注入直後、処置部位が腫れた場合は、氷のうで短時間冷却すること。凍傷を避けるため、麻酔による無感覚が残っている場合には、注意深く使用すること。
11. 最適な矯正・整容効果を得るために、初回処置後（2週間後）にタッチアップ処置が必要になる場合がある。希望するレベルの矯正・整容効果が得られるまでタッチアップを繰り返す。タッチアップ処置の必要性は患者によりさまざまで、皺の重症度や皮膚のたるみ、皮膚の厚さ等様々な因子に左右される。本品類似品（レスチレン リフト リド）をタッチアップとして3回まで可とした一つの臨床試験において、タッチアップの回数と有害事象の発現頻度に相関が認められたが、本品及び類似品におけるタッチアップ回数が2回までの臨床試験ではタッチアップ回数と有害事象発現率に相関を認めなかった。
12. 同一部位に本品と異なる注入材（例：レスチレン リフト リド）を同時注入した場合の有効性及び安全性については臨床試験で評価されていない。
13. 初期症状である腫脹及び紅斑が消失するまで、処置部位に対する過度の日光、紫外線ランプ、極端な温度への曝露を最小限に抑えるよう患者に説明すること。処置後 24 時間は、激しい運動や、日光や高温への長時間の曝露、飲酒は避けること。一時的に、注入部位に発赤、腫脹、そう痒が起こりうることを患者に説明すること。
14. ヒアルロン酸は塩化ベンザルコニウム等の第 4 級アンモニウム塩との不適合がみられることから、本品をこの種の物質と接触させないこと。

*【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- (1) アナフィラキシーの既往歴若しくは複数の重度アレルギーの既往歴又は現病歴を有する患者〔ヒアルロン酸等を含有する皮膚注入材による注入処置に対する忍容性が低い。ため。〕
 - (2) 出血傾向のある患者〔出血のリスクが増加する。特に、アスピリン等の非ステロイド系抗炎症剤や血小板機能に影響を及ぼす薬剤を使用している患者は、注入部位の内出血や出血が増大する可能性がある。血栓溶解剤、抗凝固剤、血小板凝固阻害剤による治療を3週間以内に受けた患者に本品を使用する場合には慎重に使用すること。〕
 - (3) 自己免疫疾患の既往歴のある患者
 - (4) 免疫抑制療法を受けている患者〔感染のリスクが高くなる。〕
 - (5) ヘルペスウイルス感染症の既往歴のある患者〔ヘルペスウイルス感染症の再発を引き起こす可能性がある。〕
 - (6) 連鎖球菌性疾患（再発性の咽頭痛、急性のリウマチ熱等）の既往歴のある患者、及び心臓合併症を伴う急性リウマチ熱がみられる患者〔類似のヒアルロン酸注入材に同様の注意喚起が設定されている。〕
 - (7) ケロイド形成、肥厚性瘢痕や色素異常症を発症しやすい患者。
- 〔注入材の注入後に炎症後色素沈着変化や瘢痕形成が起こる可能性があります。〕
- 皮膚の黒い患者（フィッツパトリック・タイプ IV-VI）〔注入材の注入後に炎症後色素沈着変化が起こる可能性があります。〕。

- (8) 高齢者又は全身状態が不良の患者〔本品にはリドカインが含まれており、生理機能の低下により麻酔に対する忍容性が低下していることがある。〕
- (9) 心刺激伝導障害のある患者〔本品に含まれるリドカインが症状を悪化させるおそれがある。〕
- (10) 重症の肝機能障害又は腎機能障害のある患者〔本品に含まれるリドカインの中毒症状が発現しやすくなるおそれがある。〕
- (11) ボルフィリン症の患者〔本品に含まれるリドカインについて、急性腹症、四肢麻痺、意識障害等の急性症状を誘発するおそれがあるとの報告がある。〕

2. 重要な基本的注意

- (1) 本品に含まれるリドカインは、まれにショックあるいは中毒症状を起こすことがあることが知られている。本品の使用に際しては、患者の全身状態を把握するとともに、異常が認められた場合に直ちに救急処置がとれるよう、常時準備をしておくこと。なお、事前の静脈路確保が望ましい。また、ショックあるいは中毒症状をできるだけ避けるために次の諸点に留意すること。
 - ーリドカインによる歯科麻酔や局所投与が同時に行われる場合は、リドカインの総投与量を考慮すること。
 - ー血管の多い部位に注入する場合には、吸収が速いので、できるだけ少量を投与すること。
 - ー前投薬や術中に投与した鎮静薬、鎮痛薬等による呼吸抑制が発現することがあるので、これらの薬剤を使用する際は少量より投与し、必要に応じて追加投与することが望ましい。なお、高齢者、小児、全身状態が不良な患者、肥満者、呼吸器疾患を有する患者では特に注意し、異常が認められた際には、適切な処置を行うこと。
- その他の注意については、リドカインの添付文書を参照すること。
- (2) 他の経皮的な手技と同様、本品の注入には感染のリスクがある。注入材に関する一般的な注意を遵守すること。炎症反応が生じた場合は、感染の有無を確認し、まず感染を治療してこれを取り除くこと。
- (3) 処置に先立ち、患者の既往歴を確認し、適応対象、期待される効果、必要な注意事項及び発現する可能性のある有害事象（外見的に望ましくない有害事象を含む）について患者に説明すること。過度の整容効果を期待する患者は、本品による治療に適さない。また、本品が疼痛緩和のための麻酔効果を持つ注入材であることを患者に説明し、本品の使用を希望するかどうかを確認すること。
- (4) 本品の使用により問題となるような兆候があれば直ちに医師へ報告するよう患者に説明すること。
- (5) 本品は局所麻酔剤を含むため、眼窩周囲へは慎重に使用すること。〔持続性眼筋機能不全を引き起こすリスクがある。〕
- (6) 非臨床試験及び毒性学的リスク評価に基づき、患者 1 人あたりの年間使用量は、体重 60kg あたり 48mL を超えてはならない。この量を超える注入の安全性は確立されていない。
- (7) すでに下眼瞼の色素過剰、皮膚菲薄化が認められる患者及び腫脹を生じやすい患者は、下眼瞼部の処置に適さない。
- (8) インプラントが留置されている部位近傍への処置は、特に注意すること。また、ヒアルロン酸以外のものが埋め込まれ

ている部位に本品を注入しないこと。非注入式のインプラントが留置されている部位に本品を注入しないこと。

鼻形成術を受けた患者への注入は、血液供給に影響を及ぼすおそれがあるため、特に注意すること。

- (9) 脱毛、紫外線照射、レーザーピーリング、メカニカルピーリング又はケミカルピーリング等の皮膚治療法を併用した場合の本品の安全性は確立されていない。また、本品による処置後に、レーザー治療、ケミカルピーリング又はその他の皮膚への処置を行う場合、注入部位に炎症反応を誘発するリスクがある。これらの処置の実施後、皮膚が完全に治癒する前に本品を注入する場合も同じリスクがある。

3. 相互作用

本品に含まれるリドカインは、主として肝代謝酵素 CYP1A2 及び CYP3A4 で代謝される。

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
クラス III 抗不整脈剤 アミオダロン等	心機能抑制作用が増強するおそれがあるので、心電図検査等によるモニタリングを行うこと。	作用が増強することが考えられる。
血管収縮剤 アドレナリン等	リドカインの局所作用が増強及び遷延するおそれがある。	リドカインの血管内への吸収阻害による拡散低下が考えられる。
アミド型局所麻酔剤 クラス I 抗不整脈薬	中毒症状が相加的に起こるおそれがある。	併用により中毒症状が相加的に起こることが考えられる。

4. 不具合・有害事象

本品に関して以下の有害事象がある。可能性のある有害事象も含まれるが、以下に限らない。

(1) 不具合

ニードルやルアーロックアダプターが外れる※、漏出※、シリンジ又はその他構成品の破損※

※: これらの不具合を避けるには正しい組み立てが重要である。

「使用方法に関連する使用上の注意」の「事前準備」の項を参照すること。海外臨床試験では、本品と因果関係がある重篤な不具合は認められなかった。（【臨床成績】の項を参照）

(2) 有害事象

*1) 重大な有害事象

一血管障害：血管内への誤注入又は局所的血管圧迫の結果、白変、変色、水疱様的事象、壊死又は潰瘍として現れる注入部位又は血流の供給を受けている部位の虚血が生じることがある。ごくまれに遠位部の塞栓による虚血性事象があらわれることもある。顔面の整容治療後に、一時的又は永続的な視力障害、失明、脳虚血又は脳卒中に関連する虚血性事象の重篤な症例がまれではあるが報告されている。鼻形成術

や他の顔面手術を受けた患者では局所の血管系の変化により、こうした事象を生じるリスクが高い。

本品に含まれるリドカインには、次のような重大な副作用が知られている。

ショック、意識障害・振戦・痙攣、悪性高熱

なお、その他の有害事象についてはリドカインの添付文書を参照すること。

*2) その他の有害事象

腫脹/浮腫（即時発現および治療後数週間までの発現）、内出血/出血、皮膚変色/色素過剰、紅斑、膿疱、蜂巣炎、化膿性分泌物を含む感染/膿瘍、炎症、虚血/壊死、腫瘍/硬結、疼痛/圧痛、丘疹/小結節、過敏症/血管浮腫、感覚異常、顔面神経麻痺、感覚鈍麻、錯感覚といった神経学的症状、そう痒症、ざ瘡、皮膚萎縮/瘢痕/痂皮、水疱/小水疱、末梢血管拡張等の毛細血管障害、皮膚炎、注入材の移動、瘻孔、肉芽腫/異物反応、発疹、ヘルペス感染症の再活性化、顔面のむくみ、蕁麻疹、灼熱感、剥脱、刺激感、不快感、熱感を含む他の注入部位反応及び皮膚反応、ドライアイ、眼刺激、眼痛、眼部腫脹、眼瞼下垂、流涙増加、視力障害、失明、霧視、視力低下を含む目の障害、注入剤の排出、筋攣縮及び筋力低下を含む筋肉障害、被包反応、脱毛、口唇のひび割れ、皮膚のしわを含むその他の皮膚事象、その他（不安、めまい、呼吸困難、頭痛、インフルエンザ様疾患、不眠、倦怠感、悪心、発熱、副鼻腔炎）

ルペス感染症の再活性化、顔面のむくみ、蕁麻疹、灼熱感、剥脱、刺激感、不快感、熱感を含む他の注入部位反応及び皮膚反応、ドライアイ、眼刺激、眼痛、眼部腫脹、眼瞼下垂、流涙増加、視力障害、失明、霧視、視力低下を含む目の障害、注入剤の排出、筋攣縮及び筋力低下を含む筋肉障害、被包反応、脱毛、口唇のひび割れ、皮膚のしわを含むその他の皮膚事象、その他（不安、めまい、呼吸困難、頭痛、インフルエンザ様疾患、不眠、倦怠感、悪心、発熱、副鼻腔炎）

海外臨床試験では、試験製品又は処置と関連のある重篤でない有害事象は次のとおりであった：内出血、灼熱感、浮腫、色素減少、色素過剰、そう痒症、腫瘍、疼痛、紅斑、痂皮、圧痛、腫脹、発赤

海外臨床試験では、本品と因果関係がある重篤な有害事象は認められなかった。（【臨床成績】の項を参照）

5. 妊婦、授乳婦及び小児等への適用

次の患者への安全性及び有効性は確立していない。

- (1) 妊婦及び授乳婦
- (2) 18 歳未満の患者（本品の治験は 29 歳を超える被験者について評価が行われた。）

6. その他の注意

- (1) 包装が破損している場合は使用しないこと。
- (2) 未使用の医療機器への汚染、感染のリスクを防ぐため、使用後のシリンジ及びニードルは、感染性廃棄物として、適切に処理すること。再滅菌禁止。

【臨床成績】

*レスチレン リフト及びレスチレンの比較試験^{1)、2)}

無作為化、評価者盲検、多施設共同、比較試験により、18～75 歳の Fitzpatrick 分類の皮膚タイプ IV、V 又は VI の被験者を対象にほうれい線の整容に対するレスチレン リフト（本品類似品）及びレスチレン（リドカインを含まないことを除き、本品と同一成分）の有効性及び安全性を比較した。一部の被験者では必要に応じて口角部の整容も実施した。登録された被験者は 150 名（年齢 29～74 歳、平均 51.6 歳、男性 10 名、女性 140 名）であり、

両側のほうれい線の一方をレスチレン リフトに、他方をレスチレンに無作為に割り付けて処置し（スプリットフェイスデザイン）、これらの2群を2つのデータセットとして評価した。150名のうち77名が2週間後の来院時にタッチアップ治療を受けた。

有効性評価

治験担当医師が評価した WSRS スコア^{*}では、臨床的に意味のある改善（治験担当医師が評価した WSRS スコア^{*}が1ポイント以上改善）が維持されていた被験者数は以下のとおりであり（下表参照）、両処置の耐用性は6カ月を超えるものと考えられる。被験者あたり片側の処置部位あたりの総注入量（タッチアップを含む）は最大6.0mL、被験者あたり両側の総注入量の中央値は約3.0mLであった。

表1：WSRS スコア^{*}で1ポイント以上改善のあった被験者

評価時点	レスチレン	レスチレンリフト
処置の6週後	142/148 (95.9%)	140/148 (94.6%)
処置の12週後	139/149 (93.3%)	137/149 (91.9%)
処置の24週後	109/150 (72.7%)	105/150 (70.0%)

安全性評価

安全性は処置後2週間の被験者日誌と、処置の3日後、2週間後、6週間後、12週間後、及び24週間後の医師による観察によって評価した。両製品の有害事象の内容及び発生頻度は類似しており（下表参照）、ほとんどの有害事象が軽度かつ一時的であり、70%が2週間後までに消散した。皮膚の色が濃い被験者（Fitzpatrick 分類IV～VI）で炎症後の色素変化が観察された。本品を含む皮膚注入材の注入後にはケロイドが起きることがある。本試験では重篤な局所的有害事象はなく、ケロイド形成はなかった。

表2：処置後12週間までの試験製品又は注入手技と関連のある有害事象の発現件数

局所性有害事象	ほうれい線 (件)		口角 (件)		合計 (件)	
	R	RL	R	RL	R	RL
内出血	8	8	2	4	10	12
灼熱感	1	0	0	0	1	0
浮腫	4	4	0	0	4	4
色素減少	1	0	0	0	1	0
色素過剰	7	6	2	2	9	8
そう痒症	3	1	0	0	3	1
腫瘍	0	0	1	0	1	0
疼痛	2	2	1	1	3	3
紅斑	13	13	3	3	16	16
痂皮	3	0	0	0	3	0
圧痛	4	3	0	1	4	4
合計	46	37	9	11	55	48

R：レスチレン、RL：レスチレン リフト

^{*}WSRS スコア ; Wrinkle severity rating scale, 皺重症度評価尺度

本品及びレスチレンの比較試験³⁾

本試験では、無作為化、二重盲検法により、18～65歳の被験者を対象にレスチレン リド（本品）とレスチレン（リドカインを含まないことを除き、本品と同一成分）のほうれい線整容時の忍容性、有効性及び安全性を比較検討した。60例（年齢：37～64歳、平均52.1歳、男性2名、女性58名）の被験者を対象に、片側のほうれい線を本品に、反対側のほうれい線をレスチレンに無作為に割りつけて処置を行い（スプリットフェイスデザイン）、安全性評価対象とした。忍容性は疼痛で評価し、注入終了時及び注入後15分、30分、45分、60分の計5回、疼痛なし～疼痛ありまでを100mm視覚的アナログ尺度（VAS）内の位置で処置部位ごとに評価し、両処置部位を比較し被験者内差を求めた。18名の被験者は2週間後の来院時にタッチアップ治療を受けた（うち4名は片側のほうれい線のみ）。以下に忍容性評価及び安全性評価の結果を示す。

忍容性評価

注入終了時、本品を注入した側はレスチレンを注入した側より処置時の疼痛が少なかった（各ほうれい線の疼痛をVASで評価した際、本品側のスコア平均がレスチレン側より10mm以上低い）被験者は、60例中43例（71.7%）だった。時間の経過により各被験者の疼痛は両側とも減少し、両製品の疼痛スコア平均の差は、処置直後の30.3mmから60分後の2.2mmへと減少するが、何れの時点においても本品側の疼痛スコア平均の方が低かった。

表3：VAS スコアが10mm以上であった被験者数（n=60）

時間	n (%)	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限
注入終了時	43 (71.7)	58.6	82.5
15分後	28 (46.7)	33.7	60.0
30分後	17 (28.3)	17.5	41.4
45分後	10 (16.7)	8.3	28.5
60分後	4 (6.7)	1.8	16.2

安全性評価

被験者日誌によると安全性評価対象60例中42例（70.0%）において本研究の治療と関連のある有害事象が認められたが、両製品の有害事象の内容及び発生頻度は類似しており（下表参照）、多くの症状は7日以内に消散した。本試験では重篤な有害事象は認められなかった。

表4：処置後2週間以内の被験者日誌で有害事象が報告された被験者数（n=60）

	レスチレン リド (本品) n (%)	レスチレン n (%)
圧痛	41 (68.3)	39 (65.0)
腫脹	40 (66.7)	36 (60.0)
内出血	35 (58.3)	31 (51.7)
発赤	30 (50.0)	28 (46.7)
疼痛	27 (45.0)	27 (45.0)
そう痒感	8 (13.3)	7 (11.7)
その他	4 (6.7)	7 (11.7)

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・25℃以下。遮光。
- ・凍結しないこと。

【有効期間】

滅菌より 36 ヶ月（外箱に表示）

【主要文献及び文献請求先】

【主要文献】

- 1) Taylor SC, Burgess CM, Callender VD., Safety of nonanimal stabilized hyaluronic acid dermal fillers in patients with skin of color: a randomized, evaluator-blinded comparative trial., Dermatol Surg. 2009 Oct;35 Suppl 2:1653-60
- 2) Taylor SC, Burgess CM, Callender VD, Efficacy of Variable-Particle Hyaluronic Acid Dermal Fillers in Patients with Skin of Color: A Randomized, Evaluator-Blinded Comparative Trial., Dermatol Surg. 2010;36:741-749
- 3) Weiss R, Bank D, Brandt F. Randomized, Double-Blind, Split-Face Study of Small-Gel-Particle Hyaluronic Acid with and without Lidocaine During Correction of Nasolabial Folds. Dermatol Surg. 2010;36:750-9



【文献請求先】

ガルデルマ株式会社 お客様相談室
住所：東京都千代田区大手町 1-9-7
電話番号：0120-407-001

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ガルデルマ株式会社
住所：東京都千代田区大手町 1-9-7
<https://www.galderma.com/jp-jp/japan>

外国製造業者：

Q-Med AB（スウェーデン）

レスチレンはガルデルマの商標です。
www.galderma.com

****90-14363-01**